



EMODIAL s.r.l.

Via Finati, 4/A - Ferrara (ITALY)
Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414
www.emodial.it - info@emodial.it



Vertrieb durch:

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
Fon +49 (0)561.7668635 | Fax +49 (0)561.7668636
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de

REV. FEB 2023 EXIT-POCKET-PT - ref. GB0015



EMODIAL s.r.l.

EXIT-POCKET-PT[®]

Peritoneal-Beutel zum
Schutz des Katheters



EXIT-POCKET-PT®

Beschreibung

Non Woven Beutel ausgestattet mit elastischem Gürtel und Klettverschluss.

Indikation

Zur Aufnahme der Katheters zwischen den Dialysebehandlungen; zum Schutz der Katheteraustrittsstelle.

Zweck

Schützt die den Katheter umgebende Haut und wirkt als Barriere gegen mikrobielle Kontamination.

Vorteile

- Schnelle und einfache Platzierung.
- Geeignet, um die Haut vor mechanischer Reibung durch den Katheter zu bewahren.
- Die komfortable Passform macht ein Tragen unter der Kleidung möglich ohne dabei normale, tägliche Aktivitäten zu stören.
- Steigert die Lebensqualität von katheterisierten Patienten.
- Einfach und schnell zu entfernen/wechseln.



Abb. 1



Abb. 2

Peritoneal-Beutel zum Schutz des Katheters

Gebrauchsanweisung

- 1** Den Katheter in den Beutel einlegen.
- 2** Justieren Sie die Größe des Gurtes, indem sie beide Enden des spezifischen Klettverschlusssystems überlagern
- 3** Kürzen Sie das überschüssige Ende das Baumwollgürtels mit einer Schere (siehe Abb. 1)
- 4** Regulieren Sie die elastische Spannung und schneiden Sie das überschüssige Ende des elastischen Gurtbandes ab (siehe Abb. 2).



Bestelldaten Daten und technische Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

CODE	PZN	Größe in cm	VE
S2010/PT	17273995	24X7	40
S2013/PT	17273989	18X7	40

Klassifikation: Klasse I unsterile Medizinprodukte.
Typ: Wiederverwendbar nach 2-3 maliger Handwäsche, bei max. 30°C